



NOBAMED Paul Danz AG

RUDAVLIES®-steril

REF 072595

Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Das Trägermaterial des sterilen Wund-schnellverbands (Größe: 35 cm x 10 cm) besteht aus einem weißen, elastischen Vliesstoff und ist mit einem hypoallerge-nen Polyacrylatkleber beschichtet. Die Wundauf-lage verklebt nicht mit der Wunde und wird rundum durch das Trägermaterial geschützt. RUDAVLIES®-steril ist einzeln steril verpackt.

Zusammensetzung

Polyester, Viskose, Polyethylen, Polyac-rylatkleber

Kontraindikationen

Bei einer bestehenden Allergie gegen das Material sollte das Produkt nicht ange-wendet werden.

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Pro-dukt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Normative und regulative

Anforderungen, Gemeinsame Spezifika-tionen

Medizinprodukt nach MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745.

Die Sterilisation erfolgt entsprechend der DIN EN 11135.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Verpackung

Primär	Papier-Verpackung
Sekundär	Faltschachtel aus Cellulose
Tertiär	Karton aus Cellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter www.nobamed.com



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und DIN EN ISO 20417.

Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei.

Sterilprodukt

Führen Sie vor der Verwendung eines Sterilproduktes eine Sichtprüfung der Ver-packung auf Unversehrtheit durch.

Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalpro-dukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Rege-lungen und Standards der Infektionspro-phylaxe.