



NOBAMED Paul Danz AG

RUDADERM®-universal

REF 090105

Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Die Pflasterstrips (Maße 1,6 cm x 5,7 cm) bestehen aus einem Trägermaterial aus einem flexiblen, beigen, luftdurchlässigen Kunststoff mit hypoallergenem Polyacrylatkleber und nicht-verklebender Wundauflage. Sie sind einzeln steril abgepackt und dienen zur Abdeckung von Injektionsstellen, kleinen Punktionen (z.B. Venenpunktion) und primär heilenden kleineren Wunden.

Zusammensetzung

Polyethylen-Vinylacetat-Träger,
Wundauflage aus Viskose, Polyester, Polypropylen, Polyethylen
hypoallergener Polyacrylatkleber

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach
MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745.
Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Verpackung

Primärverpackung: Papier-Verpackung

Sekundärverpackung: Faltschachtel
aus Zellulose

Tertiärverpackung: Karton aus Zellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter www.nobamed.com



STERILE EO



CE
0123

Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und DIN EN 1041.

Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei.

Sterilprodukt

Führen Sie vor der Verwendung eines Sterilproduktes eine Sichtprüfung der Verpackung auf Unversehrtheit durch.

Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe.