



**NOBAMED Paul Danz AG**

## MULLKOMPRESSEN

REF 856055

### Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Unsteril verpackte **12-fach** gelegte Mullkom-  
presse aus 17-fädigen Verbandmull, der **Grö-  
ße 5 cm x 5 cm à 100 Stück**, mit nach innen  
eingeschlagenen Schnittkanten. Die Mullkom-  
presse dient der allgemeinen Erstversorgung  
von Wunden, zur Wundreinigung, zur Wund-  
abdeckung und zum Aufsaugen von Blut und  
Körperflüssigkeiten. Die Mullkomresse ist für  
den einmaligen Gebrauch bestimmt.

### Zusammensetzung

Baumwolle

### Kontraindikationen

Bei einer bestehenden Allergie gegen das  
Material sollte das Produkt nicht angewendet  
werden.

### Hinweis

Das Produkt sollte vor der Verwendung auf  
offenen Wunden mit einem validierten Verfah-  
ren sterilisiert werden. Das Produkt kann mit  
Feuchter Hitze bei 121°C/ 134°C, 2 bis 3 bar,  
nach DIN EN 17665, Strahlen nach DIN EN  
ISO 11137 oder Ethylenoxid nach DIN EN ISO  
11135 sterilisiert werden.

### Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt  
schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese  
nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und  
der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in  
dem der Anwender und/oder der Patient nie-  
dergelassen ist, zu melden.

### Normative und regulative Anforderun- gen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDR (EU) 2017/745.

Das Produkt enthält keine gefährlichen  
toxischen Substanzen gemäß REACH.

### Verpackung

Primärverpackung: sterilisierbare  
Papiertüte  
Sekundärverpackung: Karton aus  
Zellulose

### Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter [www.nobamed.com](http://www.nobamed.com)



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen  
mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und  
DIN EN ISO 20417.

### Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei.

### Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten  
kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung  
führen. Die Aufbereitung für die Wiederver-  
wendung kann die Leistung des Produkts be-  
einträchtigen.

### Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen  
und Standards der Infektionsprophylaxe.