



NOBAMED Paul Danz AG

GEHÖRGANGTUPFER

REF 875008

Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Der Gehörgangtupfer (Größe S, Länge: 6 cm) ist ein gedrehter Tupfer, der aufgrund seiner spitzen Form für die Anwendung bei Behandlungen am Ohr geeignet ist. Der Gehörgangtupfer besteht aus 20-fädigem Verbandmull aus Baumwolle gemäß DIN EN 14079. Vor dem Einsatz am Ohr muss das Produkt mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden.

Zusammensetzung

Baumwolle

Kontraindikationen

Bei einer bestehenden Allergie gegen das Material sollte das Produkt nicht angewendet werden.

Hinweise

Vor Gebrauch sterilisieren

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Normative und regulative

Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745.

Der Verbandmull entspricht den Anforderungen der DIN EN 14079 Typ 20.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Verpackung

Primär:

Faltschachtel
aus Zellulose

Sekundär:

Karton aus Zellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter www.nobamed.com



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und DIN EN ISO 20417.

Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei

Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe.