



**NOBAMED Paul Danz AG**

## **ABDOMINALVERBAND**

**REF 371210**

### **Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung**

Die dauerelastische Bandage, Größe 5, 105 cm – 115 cm, ist 25 cm breit und mit einem Polster, das auf dem Bauch zu liegen kommt, versehen. Sie lässt aufgrund eines Klettverschlusses eine Variationsmöglichkeit von ca. 10 cm zu. Sie dient der Entlastung der Wundnaht nach Operationen im Bauchraum. Das Abdominalpolster verteilt den Druck auf die Bauchdecke gleichmäßig. Die Bandage kann bei geschlossenen Klettverschlüssen mit max. 30°C gewaschen werden. Eine chemo-thermische Aufbereitung ist aufgrund der Materialien nicht möglich, so dass das Produkt nicht an mehreren Patienten eingesetzt werden kann. Sie ist nicht zur Dauerverwendung als Rückenbandage vorgesehen.

### **Zusammensetzung**

Baumwolle, Polyester, Elasthan, Polyamid

### **Ereignisberichterstattung**

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

### **Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen**

Medizinprodukt nach  
MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745  
Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

### **Verpackung**

Primär: Faltschachtel aus Zellulose

Sekundär: Karton aus Zellulose

### **Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:**

Erläuterungen unter [www.nobamed.com](http://www.nobamed.com)



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und DIN EN ISO 20417.

### **Lagerung und Transport**

Trocken und staubfrei.

### **Produkte zur Einmalverwendung**

Bestimmt für die Verwendung an einem Patienten. Die Aufbereitung von Einmalprodukten kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen. Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen.

### **Entsorgung**

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe.