

Contam® Normalausführung




Empfohlen u.a. vom Team der Frauenklinik Hagen-Haspe, Chefarzt Dr. med. Kociszewski (AGUB III)

Hilfsmittel-Nr.: 15.25.21.2004

Material: PVA Schaumstoff

Faden: Baumwolle

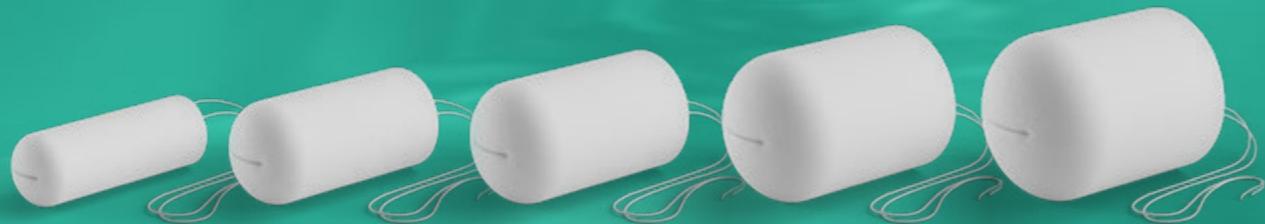

Ohne Tampon: Vaginal-, Blasen- und Harnröhrenbereich ohne Tampon.



Richtige Anwendung: Tampon im Vaginalbereich übt Druck auf Harnröhre aus. Damit wird unkontrollierter Harnabgang verhindert (Tampon in eine für Sie angenehme Position bringen).



Falsche Anwendung: Tampon ist zu tief die Scheide eingeführt.

A Alle Anwendungshinweise finden Sie auf Seite 16.

Blasenschwäche

Anwendung bei Belastungsinkontinenz und Mischinkontinenz mit Drangproblematik sowie zur Stärkung / Aktivierung der Beckenbodenmuskulatur. Durch Contam® wird ungewollter Harnverlust verhindert.



Art. Nr.	Bezeichnung	ø / Länge* (mm)	PZN	Menge
5900	Startset	Mini 22 / 60	01666592	3 St.
		Regular 28 / 60		
		Extra 33 / 65		
6220	Mini	22 / 60	01595283	10 St.
			00652091	20 St.
			00652116	50 St.
6260	Regular	28 / 60	01595308	10 St.
			00652151	20 St.
			00652168	50 St.
6330	Extra	33 / 65	01595277	10 St.
			00652180	20 St.
			00652197	50 St.
6400	Extra-Plus	40 / 65	02518617	10 St.
			02518646	20 St.
			02518652	50 St.
6450	Super-Plus	45 / 65	03409988	10 St.
			03410112	20 St.
			03410106	50 St.

So wählen Sie die richtige Größe: Mit dem Startset (verordnungsfähig), bestehend aus 3 Tampons (je 1x Mini, Regular, Extra), können Sie individuell die richtige Größe auswählen.

* Zirkawerte in feuchtem Zustand