

Contam® Normalausführung



Empfohlen u.a. vom Team der Frauenklinik Hagen-Haspe, Chefarzt Dr. med. Kociszewski (AGUB III)

Hilfsmittel-Nr.: 15.25.21.2004	Material: PVA Schaumstoff	Faden: Baumwolle
--------------------------------	---------------------------	------------------



Ohne Tampon: Vaginal-, Blasen- und Harnröhrenbereich ohne Tampon.



Richtige Anwendung: Tampon im Vaginalbereich übt Druck auf Harnröhre aus. Damit wird unkontrollierter Harnabgang verhindert (Tampon in eine für Sie angenehme Position bringen).



Falsche Anwendung: Tampon ist zu tief die Scheide eingeführt.

A Alle Anwendungshinweise finden Sie auf Seite 16.

Blasenschwäche

Anwendung bei Belastungsinkontinenz und Mischinkontinenz mit Drangproblematik sowie zur Stärkung / Aktivierung der Beckenbodenmuskulatur. Durch Contam® wird ungewollter Harnverlust verhindert.



Art. Nr.	Bezeichnung	Ø / Länge* (mm)	PZN	Menge
5900	Startset	Mini 22 / 60	01666592	3 St.
		Regular 28 / 60		
		Extra 33 / 65		
6220	Mini	22 / 60	01595283	10 St.
6260	Regular	28 / 60	00652091	20 St.
			00652116	50 St.
			01595308	10 St.
6330	Extra	33 / 65	00652151	20 St.
			00652168	50 St.
			01595277	10 St.
6400	Extra-Plus	40 / 65	00652180	20 St.
			00652197	50 St.
			02518617	10 St.
6450	Super-Plus	45 / 65	02518646	20 St.
			02518652	50 St.
			03409988	10 St.
			03410112	20 St.
			03410106	50 St.

So wählen Sie die richtige Größe: Mit dem Startset (verordnungsfähig), bestehend aus 3 Tampons (je 1x Mini, Regular, Extra), können Sie individuell die richtige Größe auswählen.

* Zirkawerte in feuchtem Zustand

Contam® Normalausführung



Empfohlen u.a. vom Team der Frauenklinik Hagen-Haspe, Chefarzt Dr. med. Kociszewski (AGUB III)

Hilfsmittel-Nr.: 15.25.21.2004	Material: PVA Schaumstoff	Faden: Baumwolle
--------------------------------	---------------------------	------------------



Ohne Tampon: Vaginal-, Blasen- und Harnröhrenbereich ohne Tampon.



Richtige Anwendung: Tampon ist tief genug in die Scheide eingeführt.



Falsche Anwendung: Tampon ist nicht tief genug in die Scheide eingeführt.

B Alle Anwendungshinweise finden Sie auf Seite 16.

Senkungsbeschwerden

Anwendung bei manueller Rückführung von Vaginalprolaps und Gebärmuttervorfällen. Der Tampon verhindert im Vaginalbereich das partielle bzw. vollständige Ausstülpfen der Vagina oder Gebärmutter.



Art. Nr.	Bezeichnung	Ø / Länge* (mm)	PZN	Menge
5950	Startset	Extra 33 / 65	10408966	3 St.
		Extra-Plus 40 / 65		
		Super-Plus 45 / 65		
6330	Extra	33 / 65	01595277	10 St.
			00652180	20 St.
			00652197	50 St.
6400	Extra-Plus	40 / 65	02518617	10 St.
			02518646	20 St.
			02518652	50 St.
6450	Super-Plus	45 / 65	03409988	10 St.
			03410112	20 St.
			03410106	50 St.

So wählen Sie die richtige Größe: Mit dem Startset (verordnungsfähig), bestehend aus 3 Tampons (je 1x Extra, Extra Plus, Super Plus), können Sie individuell die richtige Größe auswählen.

* Zirkawerte in feuchtem Zustand