

Contam® Würfeltampon



Empfohlen u.a. vom Team der Frauenklinik Hagen-Haspe, Chefarzt Dr. med. Kociszewski (AGUB III)

Hilfsmittel-Nr.: 15.25.21.2004

Material: PVA Schaumstoff

Faden: Baumwolle



Ohne Tampon: Vaginal-, Blasen- und Harnröhrenbereich ohne Tampon.



Richtige Anwendung bei Senkungsbeschwerden: Würfel ist tief genug in die Scheide eingeführt.



Richtige Anwendung bei Senkungsbeschwerden mit versteckter Blasenschwäche: Würfel mittig platziert übt zusätzlichen Druck auf den Harnröhrenbereich aus.

Blasenschwäche / Senkungsbeschwerden

Mit dem Contam® Vaginaltampon in Würfelform können verschiedene Grade der Scheiden- und Gebärmuttersenkung sowie Blasenentleerungsstörungen behandelt werden.

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessung (mm)*	PZN	Menge
6000	Startset	Größe 1 32x32 Größe 2 37x37 Größe 3 42x42	10992669	3 St.
6100	Größe 1	32x32	10796922	5 St.
			10796939	20 St.
6150	Größe 2	37x37	10796945	5 St.
			10796951	20 St.
6200	Größe 3	42x42	10992675	5 St.
			10992706	20 St.
6205	Größe 4	50x50	11615207	5 St.
			11615213	20 St.
6210	Größe 5	55x55	11615242	5 St.
			11615259	20 St.



So wählen Sie die richtige Größe: Mit dem Startset (verordnungsfähig), bestehend aus 3 Tampons (je 1x Größe 1, Größe 2, Größe 3), können Sie individuell die richtige Größe auswählen.

* Zirkawerte in feuchtem Zustand