


FLOCARE® PURSOFT FÜR FRÜH- UND NEUGEBORENE

≤6
WOCHEN

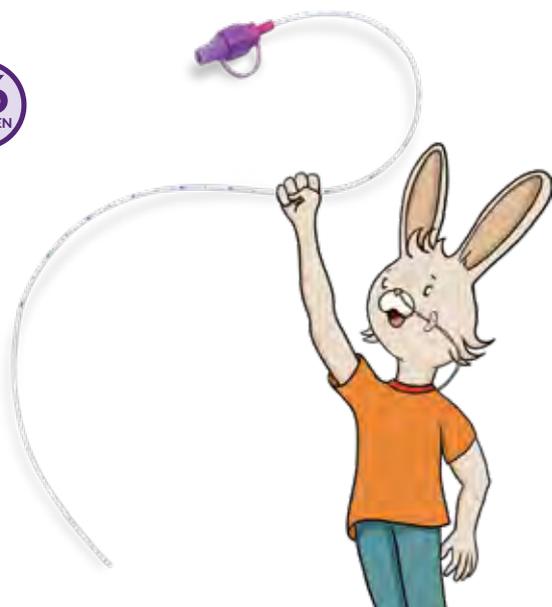

Produktbeschreibung

- transnasale, transparente Sonde aus biostabilem, weichmacherfreiem Polyurethan (PUR)
- mit 3 weißen Kontraststreifen, Längenmarkierungen jeden cm, Längenangaben alle 2 cm
- internationale Farbkodierung der Konnektoren nach CH-Größe
- kinderfreundlicher ENFit™ Konnektor durch verkürzte Haltetasche > inkompatibel mit Luer- und ENLock-Anschlüssen
- mit offener, verdickter und oval-bolusförmiger atraumatischer Sondenspitze

Anwendungshinweise

- Einsatz: kurz- bis mittelfristig (bis zu 6 Wochen)
- Beginn der Nahrungsapplikation nach Lagekontrolle, entweder röntgenologisch oder durch Aspiration von Magensaft > pH-Wert-Messung* (pH-Wert < 5,5)

Weitere Produkteigenschaften und deren Nutzen

offene distale Sondenspitze	>	reduziert des Risiko bakterieller Kontamination durch eine Ansammlung von Nahrungsresten
verdickte, oval-bolusförmige atraumatische Sondenspitze	>	komplikationslose Platzierung der Sonde
zwei seitliche, runde Sondenaustrittslöcher nahe am distalen Ende mit weichen Rändern	>	Sicherstellung der Ernährung in den Magen
weiches Schlauchmaterial	>	komplikationslose Platzierung der Sonde, auch ohne Mandrin (Knickstabilität)
verkürzte Haltetasche der Verschlusskappe	>	Minimierung eines versehentlichen Herausziehens der Sonde
frei von schädlichen Stoffen und Weichmachern (PVC-, DEHP- und BPA)	>	Anwendung ohne Materialveränderung

* pH-Wert-Messung nicht geeignet bei Patient:innen, die Protonenpumpen-Inhibitoren erhalten, dies führt zu einer Veränderung des pH-Wertes.

Handelsform

PZN	Art.-Nr.	SAP-Nr.	HiMi.-Nr.	Bezeichnung	CH	Ansatz	Innen Ø in mm	Außen Ø in mm	Länge in cm	VPE
Kindersonden										
14132863	682968	182968	beantragt	Flocare® PURSOFT	4	ENFit™	0,8	1,3	40	10 St.
14132886			beantragt	Flocare® PURSOFT	4	ENFit™	0,8	1,3	40	1 St.
11289423	594573	94573	03.36.02.3002	Flocare® PURSOFT	5	ENFit™	1,0	1,7	40	10 St.
11289446			03.36.02.3002	Flocare® PURSOFT	5	ENFit™	1,0	1,7	40	1 St.
11289452	594574	94574	03.36.02.3003	Flocare® PURSOFT	5	ENFit™	1,0	1,7	60	10 St.
11289469			03.36.02.3003	Flocare® PURSOFT	5	ENFit™	1,0	1,7	60	1 St.
16045298	654098	154098	03.36.04.3013	Flocare® PURSOFT	6	ENFit™	1,3	2,0	40	10 St.
16045281			03.36.04.3013	Flocare® PURSOFT	6	ENFit™	1,3	2,0	40	1 St.
10185839	621541	121541	03.36.04.3013	Flocare® PURSOFT	6	ENFit™	1,3	2,0	60	10 St.
10185845			03.36.04.3013	Flocare® PURSOFT	6	ENFit™	1,3	2,0	60	1 St.

M = Sonde mit bereits vormontiertem,
gleitmittelbeschichtetem Mandrin (silikonisiert)

