

# FLOCARE® GASTROTUBE



## Produktbeschreibung

- transparente Austauschsonde für eine primär platzierte, perkutane, gastrale Ernährungs-sonde
- aus Silikon
- internationale Farbkodierung der Konnektoren nach CH-Größe
- mit ENFit™ Konnektor > inkompatibel mit Luer- und ENLock-Anschlüssen
- Blockungsschenkel mit Luer-Ansatz

## Anwendungshinweise

- Einsatz: langfristig (absehbar länger als 2-3 Wochen)
- Einfaches Platzieren/Entfernen durch ein bestehendes Magenstoma (i.d.R. ca. 4-6 Wochen nach einer PEG-Anlage)
- nur geeignet bei fertig ausgebildetem Stoma
- Blockungsvolumen Ballon:
  - CH 10: 3 ml steriles Wasser
  - CH 14: 5 ml steriles Wasser
  - CH 16: 10 ml steriles Wasser
  - CH 18: 15 ml steriles Wasser
  - CH 20: 15 ml steriles Wasser
- ideal geeignet für mobile und behinderte Heimbewohner:innen/ Patient:innen (weniger Manipulationsmöglichkeiten), insbesondere bei Kindern

## Weitere Produkteigenschaften und deren Nutzen

weiches, flexibles Silikon	>	Reduzierung des Fremdkörpergefühls > mehr Patient:innenkomfort
einfache Platzierung von außen durch und Fixierung auf der Bauchdecke	>	Sondenwechsel ohne erneute Gastroskopie, geringe Patient:innenbelastung
Längenmarkierung im 0,5-cm-Abstand	>	optimales Messinstrument zur Bauchdeckenmessung für spätere Buttonplatzierung
zur Reinigung kann die Sonde aus dem Stoma entfernt, gereinigt und danach wieder eingesetzt werden	>	einfache Reinigung und Pflege der Sonde
tropfenförmige, externe Silikonhalteplatte mit 90-Grad-Abwinkelung	>	<ul style="list-style-type: none"><li>• knickfreie Führung der Sonde</li><li>• gleichmäßige „Druckverteilung“ auf dem Bauch &gt; mehr Patient:innenkomfort</li><li>• einfaches Herauslösen der Halteplatte für den Verbandwechsel</li></ul>
mit ENFit™ Konnektor	>	<ul style="list-style-type: none"><li>• keine Verwechslungsgefahr mit i.v.-Systemen</li><li>• feste Schraubverbindung für eine sichere Verabreichung von Sondennahrung</li></ul>
Röntgenkontraststreifen in Ballon und Sondenspitze	>	Erleichterung der Lagekontrolle > Sicherheit für Ihre Patient:innen

## Handelsform

PZN	Art.-Nr.	SAP-Nr.	HiMi.-Nr.	Bezeichnung	CH	Ansatz	Innen Ø in mm	Außen Ø in mm	Länge in cm	VPE
07442221	678129	178129	03.36.03.3001	Flocare® Gastrotube	10	ENFit™	2,1	3,6	27	2 St.
07442238	678131	178131	03.36.03.3002	Flocare® Gastrotube	14	ENFit™	2,8	4,9	27	2 St.
02663696	678132	178132	03.36.03.3009	Flocare® Gastrotube	16	ENFit™	3,3	5,5	27	2 St.
07442244	678133	178133	03.36.03.3003	Flocare® Gastrotube	18	ENFit™	3,8	6,2	27	2 St.
02662923	678132	178134	03.36.03.3010	Flocare® Gastrotube	20	ENFit™	4,2	6,7	28	2 St.



Auf [www.nutricia.cc/videos](http://www.nutricia.cc/videos) zeigen wir Ihnen, wie Sie bei der Pflege der Flocare® Austauschsonden vorgehen.

