

FLOCARE® MINISOFT BUTTON



Produktbeschreibung


- sehr diskrete, transparente Austauschsonde für liegende, gastrale, perkutane Ernährungssonden
- weiches, flexibles Material (Silikon)
- verbesserte Bewegungsfreiheit der Patient:innen
- einfache Reinigung und Pflege von Stoma und MiniSoft Button
- kosmetisch beste Lösung
- im Set enthalten sind:
 - 1 Flocare® MiniSoft Button, 1 Sicherheitsverbinder (Standard, 30 cm), 2 Luer-Spritzen (5 ml), 2 Kompressen (5 x 5 cm), 1 Gleitmittel, 1 Führungsstab

Anwendungshinweise

- Einsatz: langfristig (absehbar länger als 2-3 Wochen)
- Einsetzen des Buttons über ein bestehendes, vollständig ausgebildetes Magenstoma (i.d.R. ca. 4-6 Wochen nach einer PEG-Anlage)
- nur geeignet bei fertig ausgebildetem Stoma
- Fixierung mit einem internen Rückhalteballon, der mit der unten empfohlenen Menge an sterilem Wasser befüllt wird:
 - CH 12 – 3 ml - CH 14 – 4 ml
 - CH 16 / 18 – 5 ml - CH 20 / 24 – 8 ml
- ideal geeignet für mobile und behinderte Heimbewohner:innen/ Patient:innen (weniger Manipulationsmöglichkeiten), insbesondere bei Kindern (geringere Stigmatisierung, größtmögliche Bewegungsfreiheit)

Weitere Produkteigenschaften und deren Nutzen

weiches, flexibles Silikon	>	Reduzierung des Fremdkörpergefühls > mehr Patient:innenkomfort
diskrete und kosmetisch beste Lösung	>	• verbesserte Bewegungsfreiheit • unauffällig unter der Kleidung zu tragen • Baden und Duschen problemlos möglich
Platzierung ohne erneute Gastroskopie durch vorhandenes Stoma	>	• geringe Patient:innenbelastung • Patient:innen können in ihrer gewohnten Umgebung bleiben
einfache Reinigung und Pflege von Stoma und Button	>	geringer Pflegeaufwand
separater Sicherheitsverbinder zur Nahrungsgabe	>	mehr Bewegungsfreiheit während der Nahrungspausen
große Auswahl an Button-Längen	>	genaue Anpassung an das Stoma

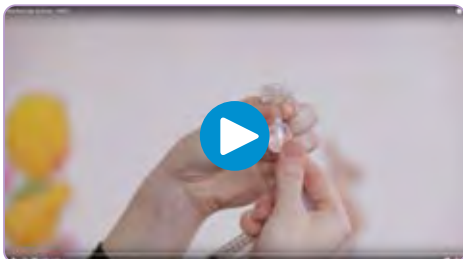

Auf www.nutricia.cc/videos zeigen wir Ihnen in einem Anwendervideo den Wechsel des Buttons.



Handelsform

PZN	Art.-Nr.	SAP-Nr.	HiMi.-Nr.	Bezeichnung	CH	Ansatz	Innen Ø in mm	Außen Ø in mm	Länge in cm	VPE
16018829	652911	152911	03.36.05.0009	Flocare® MiniSoft Button	12	für Sicherheitsverbinder	2.0	4.0	0.8	1 St.
16018835	652913	152913	03.36.05.0009	Flocare® MiniSoft Button	12	für Sicherheitsverbinder	2.0	4.0	1.0	1 St.
16018893	652983	152983	03.36.05.0009	Flocare® MiniSoft Button	12	für Sicherheitsverbinder	2.0	4.0	1.2	1 St.
16018887	652982	152982	03.36.05.0009	Flocare® MiniSoft Button	12	für Sicherheitsverbinder	2.0	4.0	1.5	1 St.
16018870	652981	152981	03.36.05.0009	Flocare® MiniSoft Button	12	für Sicherheitsverbinder	2.0	4.0	1.7	1 St.
16018864	652980	152980	03.36.05.0009	Flocare® MiniSoft Button	12	für Sicherheitsverbinder	2.0	4.0	2.0	1 St.
16018858	652979	152979	03.36.05.0009	Flocare® MiniSoft Button	12	für Sicherheitsverbinder	2.0	4.0	2.3	1 St.
16018841	652978	152978	03.36.05.0009	Flocare® MiniSoft Button	12	für Sicherheitsverbinder	2.0	4.0	2.5	1 St.
16019125	653000	153000	03.36.05.0009	Flocare® MiniSoft Button	12	für Sicherheitsverbinder	2.0	4.0	3.0	1 St.
16019094	652999	152999	03.36.05.0009	Flocare® MiniSoft Button	12	für Sicherheitsverbinder	2.0	4.0	3.5	1 St.
16019088	652998	152998	03.36.05.0009	Flocare® MiniSoft Button	12	für Sicherheitsverbinder	2.0	4.0	4.0	1 St.
16019071	652997	152997	03.36.05.0009	Flocare® MiniSoft Button	12	für Sicherheitsverbinder	2.0	4.0	5.0	1 St.
16019059	652996	152996	03.36.05.0010	Flocare® MiniSoft Button	14	für Sicherheitsverbinder	2.4	4.7	0.8	1 St.
16019042	652995	152995	03.36.05.0010	Flocare® MiniSoft Button	14	für Sicherheitsverbinder	2.4	4.7	1.0	1 St.
16019036	652994	152994	03.36.05.0010	Flocare® MiniSoft Button	14	für Sicherheitsverbinder	2.4	4.7	1.2	1 St.
16019013	652993	152993	03.36.05.0010	Flocare® MiniSoft Button	14	für Sicherheitsverbinder	2.4	4.7	1.5	1 St.
16019007	652992	152992	03.36.05.0010	Flocare® MiniSoft Button	14	für Sicherheitsverbinder	2.4	4.7	1.7	1 St.
16018999	652991	152991	03.36.05.0010	Flocare® MiniSoft Button	14	für Sicherheitsverbinder	2.4	4.7	2.0	1 St.
16018982	652990	152990	03.36.05.0010	Flocare® MiniSoft Button	14	für Sicherheitsverbinder	2.4	4.7	2.3	1 St.
16018953	652989	152989	03.36.05.0010	Flocare® MiniSoft Button	14	für Sicherheitsverbinder	2.4	4.7	2.5	1 St.
16018947	652988	152988	03.36.05.0010	Flocare® MiniSoft Button	14	für Sicherheitsverbinder	2.4	4.7	2.7	1 St.
16018930	652987	152987	03.36.05.0010	Flocare® MiniSoft Button	14	für Sicherheitsverbinder	2.4	4.7	3.0	1 St.
16018924	652986	152986	03.36.05.0010	Flocare® MiniSoft Button	14	für Sicherheitsverbinder	2.4	4.7	3.5	1 St.
16018918	652985	152985	03.36.05.0010	Flocare® MiniSoft Button	14	für Sicherheitsverbinder	2.4	4.7	4.0	1 St.
16018901	652984	152984	03.36.05.0010	Flocare® MiniSoft Button	14	für Sicherheitsverbinder	2.4	4.7	4.5	1 St.
16019326	653048	153048	03.36.05.0010	Flocare® MiniSoft Button	14	für Sicherheitsverbinder	2.4	4.7	5.0	1 St.
16019303	653047	153047	03.36.05.0011	Flocare® MiniSoft Button	16	für Sicherheitsverbinder	3.0	5.3	0.8	1 St.
16019295	653046	153046	03.36.05.0011	Flocare® MiniSoft Button	16	für Sicherheitsverbinder	3.0	5.3	1.0	1 St.
16019289	653045	153045	03.36.05.0011	Flocare® MiniSoft Button	16	für Sicherheitsverbinder	3.0	5.3	1.2	1 St.
16019272	653044	153044	03.36.05.0011	Flocare® MiniSoft Button	16	für Sicherheitsverbinder	3.0	5.3	1.5	1 St.
16019266	653043	153043	03.36.05.0011	Flocare® MiniSoft Button	16	für Sicherheitsverbinder	3.0	5.3	1.7	1 St.
16019243	653042	153042	03.36.05.0011	Flocare® MiniSoft Button	16	für Sicherheitsverbinder	3.0	5.3	2.0	1 St.
16019237	653041	153041	03.36.05.0011	Flocare® MiniSoft Button	16	für Sicherheitsverbinder	3.0	5.3	2.3	1 St.
16019220	653040	153040	03.36.05.0011	Flocare® MiniSoft Button	16	für Sicherheitsverbinder	3.0	5.3	2.5	1 St.
16019214	653039	153039	03.36.05.0011	Flocare® MiniSoft Button	16	für Sicherheitsverbinder	3.0	5.3	2.7	1 St.
16019208	653038	153038	03.36.05.0011	Flocare® MiniSoft Button	16	für Sicherheitsverbinder	3.0	5.3	3.0	1 St.
16019183	653037	153037	03.36.05.0011	Flocare® MiniSoft Button	16	für Sicherheitsverbinder	3.0	5.3	3.5	1 St.
16019177	653036	153036	03.36.05.0011	Flocare® MiniSoft Button	16	für Sicherheitsverbinder	3.0	5.3	4.0	1 St.
16019160	653035	153035	03.36.05.0011	Flocare® MiniSoft Button	16	für Sicherheitsverbinder	3.0	5.3	4.5	1 St.
16019154	653034	153034	03.36.05.0012	Flocare® MiniSoft Button	18	für Sicherheitsverbinder	3.6	6.0	0.8	1 St.
16019148	653033	153033	03.36.05.0012	Flocare® MiniSoft Button	18	für Sicherheitsverbinder	3.6	6.0	1.0	1 St.
16019131	653032	153032	03.36.05.0012	Flocare® MiniSoft Button	18	für Sicherheitsverbinder	3.6	6.0	1.2	1 St.
16019527	653089	153089	03.36.05.0012	Flocare® MiniSoft Button	18	für Sicherheitsverbinder	3.6	6.0	1.5	1 St.
16019510	653088	153088	03.36.05.0012	Flocare® MiniSoft Button	18	für Sicherheitsverbinder	3.6	6.0	1.7	1 St.
16019504	653087	153087	03.36.05.0012	Flocare® MiniSoft Button	18	für Sicherheitsverbinder	3.6	6.0	2.0	1 St.
16019496	653086	153086	03.36.05.0012	Flocare® MiniSoft Button	18	für Sicherheitsverbinder	3.6	6.0	2.3	1 St.
16019473	653085	153085	03.36.05.0012	Flocare® MiniSoft Button	18	für Sicherheitsverbinder	3.6	6.0	2.5	1 St.
16019467	653084	153084	03.36.05.0012	Flocare® MiniSoft Button	18	für Sicherheitsverbinder	3.6	6.0	2.7	1 St.
16019450	653083	153083	03.36.05.0012	Flocare® MiniSoft Button	18	für Sicherheitsverbinder	3.6	6.0	3.0	1 St.
16019444	653082	153082	03.36.05.0012	Flocare® MiniSoft Button	18	für Sicherheitsverbinder	3.6	6.0	3.5	1 St.
16019438	653081	153081	03.36.05.0012	Flocare® MiniSoft Button	18	für Sicherheitsverbinder	3.6	6.0	4.0	1 St.
16019421	653080	153080	03.36.05.0012	Flocare® MiniSoft Button	18	für Sicherheitsverbinder	3.6	6.0	4.5	1 St.
16019415	653079	153079	03.36.05.0013	Flocare® MiniSoft Button	20	für Sicherheitsverbinder	4.0	6.7	0.8	1 St.
16019390	653078	153078	03.36.05.0013	Flocare® MiniSoft Button	20	für Sicherheitsverbinder	4.0	6.7	1.2	1 St.
16019384	653077	153077	03.36.05.0013	Flocare® MiniSoft Button	20	für Sicherheitsverbinder	4.0	6.7	1.5	1 St.
16019378	653076	153076	03.36.05.0013	Flocare® MiniSoft Button	20	für Sicherheitsverbinder	4.0	6.7	1.7	1 St.
16019361	653075	153075	03.36.05.0013	Flocare® MiniSoft Button	20	für Sicherheitsverbinder	4.0	6.7	2.0	1 St.
16019349	653074	153074	03.36.05.0013	Flocare® MiniSoft Button	20	für Sicherheitsverbinder	4.0	6.7	2.3	1 St.
16019332	653073	153073	03.36.05.0013	Flocare® MiniSoft Button	20	für Sicherheitsverbinder	4.0	6.7	2.5	1 St.
16019674	653100	153100	03.36.05.0013	Flocare® MiniSoft Button	20	für Sicherheitsverbinder	4.0	6.7	3.0	1 St.
16019668	653099	153099	03.36.05.0013	Flocare® MiniSoft Button	20	für Sicherheitsverbinder	4.0	6.7	3.5	1 St.
16019661	653098	153098	03.36.05.0013	Flocare® MiniSoft Button	20	für Sicherheitsverbinder	4.0	6.7	4.5	1 St.
16019639	653097	153097	03.36.05.0001	Flocare® MiniSoft Button	24	für Sicherheitsverbinder	5.0	8.0	1.5	1 St.
16019622	653096	153096	03.36.05.0001	Flocare® MiniSoft Button	24	für Sicherheitsverbinder	5.0	8.0	1.7	1 St.
16019616	653095	153095	03.36.05.0001	Flocare® MiniSoft Button	24	für Sicherheitsverbinder	5.0	8.0	2.0	1 St.
16019585	653094	153094	03.36.05.0001	Flocare® MiniSoft Button	24	für Sicherheitsverbinder	5.0	8.0	2.3	1 St.
16019579	653093	153093	03.36.05.0001	Flocare® MiniSoft Button	24	für Sicherheitsverbinder	5.0	8.0	2.5	1 St.
16019562	653092	153092	03.36.05.0001	Flocare® MiniSoft Button	24	für Sicherheitsverbinder	5.0	8.0	2.7	1 St.
16019556	653091	153091	03.36.05.0001	Flocare® MiniSoft Button	24	für Sicherheitsverbinder	5.0	8.0	3.0	1 St.
16019533	653090	153090	03.36.05.0001	Flocare® MiniSoft Button	24	für Sicherheitsverbinder	5.0	8.0	3.5	1 St.
16019680	653101	153101	03.36.05.0001	Flocare® MiniSoft Button	24	für Sicherheitsverbinder	5.0	8.0	4.0	1 St.