

Cutimed® Siltec® Sorbact® B

Exsudatmanagement und Infektionsmanagement

Produkt

Der hochabsorbierende antimikrobielle Schaumverband mit Silikon-Hafrand vereint das effektive Exsudatmanagement von Cutimed® Siltec® mit der wirkstofffreien bakterienbindenden Wirkung von Cutimed® Sorbact®. Dank des rein physikalischen Wirkprinzips bindet und entfernt Cutimed® Sorbact® Bakterien, ohne antimikrobielle Wirkstoffe freizusetzen (Sorbact® Technology): Die spezielle Sorbact®-Beschichtung nutzt die sichere und effektive Sorbact®-Technology. Bakterien (MRSA, VRE, u.a.) und Pilze binden und verankern sich auf natürliche Weise an die einzigartige DACC™ beschichtete Oberfläche von Cutimed® Sorbact®. Die Bakterien werden irreversibel gebunden und im Wachstum gehemmt. So wird mit jedem Verbandwechsel die Keimzahl in der Wunde reduziert und optimale Bedingungen für den natürlichen Wundheilungsprozess geschaffen.

Cutimed® Siltec® Sorbact® B besteht aus einem Acetatgewebe mit einer bakterienbindenden Beschichtung und einem hochabsorbierenden, offenporigen Polyurethanschaum mit hautfreundlichem Silikon-Hafrand.


Vorteile

- keine bekannten Mechanismen zur Resistenzentwicklung bei Bakterien oder Pilzen gegenüber Cutimed® Sorbact®
- kein Abtöten von Bakterien und Pilzen, daher kein zusätzliches Freisetzen von Endotoxinen und damit einhergehende Heilungsverzögerung
- effektive Exsudataufnahme dank der Superabsorber-Technologie



LATEX
FREE
FORMULA

Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

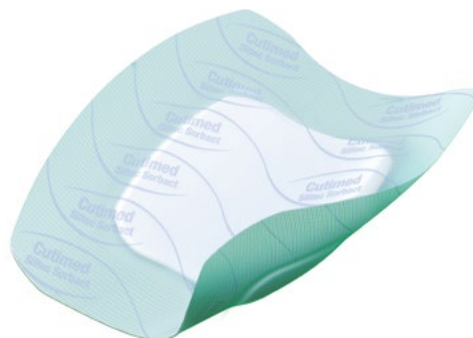

- reduziertes Mazerationsrisiko durch exzellente vertikale Absorption
- zeitlich uneingeschränkte Anwendungsdauer im Therapierverlauf

Anwendung

Cutimed® Siltec® Sorbact® B eignet sich für alle sauberen, kolonisierten, kontaminierten oder infizierten Wunden und wird bei mäßig bis stark exsudierenden oder zur Prophylaxe infekgefährdeter Wunden eingesetzt:

- chronische Wunden (z. B. venöse, arterielle oder diabetische Ulzera sowie Druckgeschwüre)
- postoperative Wunden und Wunddehiszenzen
- traumatische Wunden
- Wunden nach Exzision von Fisteln und Abszessen

Verbandwechsel

Sollte gewechselt werden, wenn er sichtbar mit Wundsekret vollgesaugt ist

Bestell-Nr.	Abmessung	Wundauflage	Inhalt (Stk.)	BE/VE	PZN
7325133	7,5 x 7,5 cm	4 x 4 cm	12	1/10	07342672
7325142	7 x 10 cm	Oval	12	1/10	13574429
7325141	10 x 10 cm	6 x 6 cm	12	1/10	13574412
7325134	12,5 x 12,5 cm	8,2 x 8,2 cm	12	1/10	07342689
7325135	15 x 15 cm	10 x 10 cm	12	1/10	07343140
7325140	10 x 22,5 cm	5 x 16,5 cm	12	1/10	13574398
7325136	17,5 x 17,5 cm	12,3 x 12,3 cm	6	1/10	07343157
7325137	22,5 x 22,5 cm	16,5 x 16,5 cm	6	1/10	07343223
7325138	17,5 x 17,5 cm	Sacrum	6	1/10	07343246
7325139	23 x 23 cm	Sacrum	6	1/10	07343269

NEUE
BNR
ALTE
PZN

Sorbact® ist eine eingetragene Marke von ABIGO medical AB