



Gebrauchsanweisung für kombinierten Bett- und Beinbeutel steril

Gültig für: KBB1000-30s, KBB1000-60s, KBB1000-90s

Beschreibung:

Der Urinbeutel ist erhältlich in der Größe 1000ml. Er besteht aus PVC-Folie medizinischer Qualität und wird mit einem knickfesten PVC-Schlauch sowie Rückschlagventil gefertigt. Er setzt sich zusammen aus einem Urinbeutel mit Abflussfunktion und einer Steuereinheit (Einlass und Ablassrohr sowie Abflussventil). Der Schlauch des Urinbeutels enthält einen selbstverschließenden Zugang, der es erlaubt, frischen Urin mit einem Entnahmegerät zu sammeln.

Es handelt sich um ein medizinisches Produkt der Klasse I steril und ist nur für den Einmalgebrauch bestimmt.

Indikation:

Das Produkt dient dem Auffangen und Sammeln von Urin, der durch den Katheter abgeleitet wird sowie der Ableitung des aufgefangenen Urins. Es ist besonders für Patienten mit Behinderung sowie bewegungsunfähige und bettlägerige Patienten geeignet.

Kontraindikation: Nein

Nebenwirkungen: Keine

Messfunktion:

Keine. Die Messanzeige dient dem medizinischen Personal als Schätzhilfe, ist für eine genaue Messung aber ungeeignet. Hierfür bitte geeignete Messbecher nutzen.

Gebrauchsanweisung:

- Waschen Sie die Hände immer vor und nach dem Leeren des Beutels.
- Hängen Sie den Beutel in Höhe oder unterhalb der Blase auf.
- Schließen Sie das Ablassventil, bevor Sie den Beutel mit dem Katheter oder einem anderen Medizinprodukt verbinden. Das Austauschen des Urinbeutels erfolgt nach Ermessen des medizinischen Fachpersonals.
- Überwachen Sie das System in regelmäßigen zeitlichen Abständen um sicherzugehen, dass der Urin frei fließt.
- Sobald der maximale Füllstand des Beutels erreicht ist, öffnen Sie das Ablassventil und entleeren Sie den Inhalt in einen geeigneten Sammelbehälter.
- Danach schließen und reinigen Sie das Ablassventil. Nutzen Sie zur Reinigung ein Desinfektionstuch und entfernen Sie mit dessen Hilfe alle Rückstände am Ablassventil.
- Zur Entnahme frischen Urins ein geeignetes Entnahmegerät durch die Öffnung im Schlauch einführen, während der Patient uriniert.

Sicherheitshinweise:

- Nur für den Einzelgebrauch. Nach der Nutzung im Müll entsorgen. Das Produkt darf nicht wiederverwendet oder resterilisiert werden. Eine Wiederverwendung birgt das Risiko von Infektionen und kann die Leistung des Produktes beeinträchtigen und bis hin zum Funktionsausfall führen.
- Dieses Produkt sollte nur unter der Leitung von medizinischem Personal, welches fachgerechtes Training erhalten hat, verwendet werden.
- Nicht verwenden, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist.
- Während des Gebrauchs muss der Beutel aufrecht hängen, im Schlauch dürfen keine Schleifen und Knicke vorhanden sein.
- Nicht in direktem Sonnenlicht, bei extremen Temperaturen oder bei hoher Feuchtigkeit lagern.

Bedeutung der Symbole auf der Verpackung



Sterilisiert mit
Ethylenoxid



Enthält oder Anwesenheit
von Phthalaten



Nicht erneut
sterilisieren



Ist ein Medizinprodukt



Nicht wiederverwenden



Hersteller



Herstellungsdatum
(Datumsformat JJJJ-MM)



Verwendbar bis
(Datumsformat JJJJ-MM)



Artikelnummer



Chargencode




Bei beschädigter Verpackung
nicht verwenden




Achtung



Trocken aufbewahren

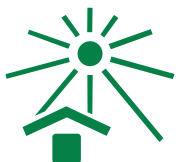

Von Sonnenlicht
fernhalten

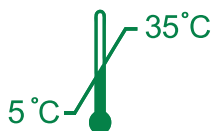

Temperaturbegrenzung



Gebrauchsanweisung
beachten



CE-Kennzeichen mit
Kennnummer der
benannten Stelle



Anzahl / Stück



Contains Phthalates:

There are no known residual risks for
Children, pregnant or nursing women.

Schlauchlänge: **30 & 60 & 90 CM**



For Life Produktions- und Vertriebsgesellschaft
für Heil- und Hilfsmittel mbH
Am Studio 16, D-12489 Berlin



PZN 12465709, 12465715, 12465721

REF KBB1000-30s, 60s, 90s