

Sofort-Kälte-Kompresse

durch Druck aktivierbar, unsteril

Produktinformation



MEDIZINPRODUKT Klasse IIa

Sofort-Kälte-Kompresse zur äußerlichen Anwendung für die Reduktion von Entzündungen und Schwellungen durch Abkühlen der Hauttemperatur

Indikationen für die Kältebehandlung

- Verbrennungen, Blutergüsse, lokale Schmerzbetäubung, Verstauchungen, Schwellungen, Krämpfe, Zerrungen

Nicht einzusetzen

- bei Durchblutungsstörungen und Kälteüberempfindlichkeit, Raynaud-Syndrom
- bei bekannter Überempfindlichkeit gegen eingesetzte Materialien

ANWENDUNG

Innenliegenden Beutel durch Drücken zum Platzen bringen
Kompresse kräftig schütteln, damit sich der Inhalt vermischt

HINWEISE

Sofort-Kälte-Kompressen nur zur äußerlichen Anwendung

Die aktivierte Kompresse nicht direkt auf die Haut legen, sondern vorher in ein Tuch einschlagen

Für Kinder unzugänglich aufbewahren, Anwendung nur unter Aufsicht eines Erwachsenen

Beutel nicht öffnen. Undichte oder beschädigte Kompressen nicht verwenden

Beschädigte Kompressen mit dem Hausmüll entsorgen

Nach versehentlichem Haut- oder Augenkontakt

- mit Wasser abwaschen bzw. ausspülen
- Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt konsolidieren

Nach versehentlicher Aufnahme durch Verschlucken

- Sofort viel Wasser trinken (keine Milch)
- Giftnotruf kontaktieren oder einen Arzt aufsuchen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Materialzusammensetzung	Füllung	Wasser, Urea
Unsteril	Hülle	Polyethylen (PE), Nylon (PA)
Haltbarkeit	4 Jahre	
Lagerung	+5°C bis +35°C, trocken und lichtgeschützt	
Nicht wiederverwendbar		
Frei von Naturkautschuklatex		
DEHP- und PHT-frei		

BESTELLINFORMATION

REF	PZN	Länge x Breite [cm]	VE [ST]
751315-Q	03277274	13 x 15	10
751520-Q	03277280	15 x 20	10

HERSTELLERINFORMATION

INTCO Medical (HK) Co., Ltd.
FLAT/RM 19C, Lockhart Centre,
301-307 Lockhart Road,
Wan Chai, Hong Kong,
P.R. CHINA