

CARE FLOW UB 750F + UB 750UF sterile/unsterile Beinbeutelsystem für den mobilen Anwender, mit Kippventil



1-Kammer-Beinbeutel, 750 ml

- ✓ Besonders Anwender mit einer eingeschränkten Handmotorik oder mit reduzierter Kraft können sicher und hygienisch den Beinbeutel mittels unseres neu entwickelten **Kippventils** entleeren.
- ✓ Dem Beinbeutel mit 50 cm Schlauchlänge ist in der Verpackung jeweils ein weiterer Stufenkonnector beigelegt. Dies ermöglicht es, den Schlauch individuell zu kürzen.
- ✓ Ein Refluxventil verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin aus dem Beuteln. Somit wird wirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.



Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN	Sterilität
750 ml	50 cm	04/01/750F/50/GHC	12371500	steril

Verpackungseinheit: 50 Stück

Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN	Sterilität
750 ml	50 cm	04/01/750UF/50/GHC	12371517	unsteril

Verpackungseinheit: 100 Stück
 Unterverpackung: jeweils 10 Stück

HMN: 15.25.05.3071
 (Art.-Nr. 04/01/750F)

HMN: 15.25.05.1096
 (Art.-Nr. 04/01/750UF)



Stufenkonnector

Die spezielle Ausrichtung der Konnektorstufen sorgt für eine zuverlässige Verbindung mit der Ringverstärkung im Kelch der Katheter. Die nadelfreie Urinprobeentnahme verhindert Nadelstichverletzungen.



Doghouse

Eine auf dem Beutel aufgebrachte belüftete Rückstecklasche gewährleistet eine sichere und zugleich hygienische Positionierung des Ablasshahns.



Vliesbeschichtung

Die Rückseite des Beinbeutels ist mit einem schweißaufsaugenden Vlies beschichtet. Dies beugt Hautreizungen wirksam vor und erhöht somit den Tragekomfort für den Anwender.



Ablassventil

Das ergonomisch geformte, flache **Kippventil** vom Ablaufschlauch lässt sich einfach und intuitiv bedienen. Um den Beinbeutel zu entleeren kippen Sie das Ablassventil um 180° nach unten.

Verpackung: steril / unsteril

Halterungen für Beinbeutel Seite 53-57.

Abbildungen können vom Original abweichen