

CARE FLOW UB 4000TUR Geschlossenes TUR Spülbeutelsystem Mit Pumpball zur kontrollierten postoperativen Blasenpflung



Spflbeutelsystem, 4.000 ml

- ✓ Der Zwillingshalter mit zusatzlicher Befestigungskordel ermoglicht eine sichere und korrekte Befestigung an den unterschiedlichsten Bettholmen.
- ✓ Die Bakterien- und flussigkeitsdichten Beluftungsfilter sorgen fur einen permanenten Druckausgleich. Dadurch wird eine optimale Drainage im System erzielt.
- ✓ Durch das kontrollierte Spfln der Blase mit dem am Zuleitungsschlauchsystem integrierten Pumpball, kann das postoperativ mgliche Austamponieren der Blase vermieden werden.
- ✓ Eine auf dem Beutel aufgebrachte Ruckstecklasche garantiert eine sichere und zugleich hygienische Positionierung des Ablasshahns.



Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN
4.000 ml	120 cm	04/02/4000/TUR/GHC	06189004

HMN: 15.25.09.0008

42



Pumpball

Unter Einsatz vom Pumpball und der beiden Schlauchklemmen, ist es in einem speziellen Zusammenspiel dieser Komponenten mglich, die Blase wie auch das Schlauchsystem von Blutkoageln bzw. Prostataspnen frei zuspfln.



Profilschlauch

Das oktagonale Innenprofil des Zuleitungsschlauchs gewhrleistet eine hervorragende Stabilitt. Der groflumig flexible Schlauch garantiert somit in jeder Situation eine sichere Urindrainage zur Tropfkammer.



Tropfkammer

Ein Rucklaufventil unterteilt die Tropfkammer und verhindert zuverlssig den Ruckfluss von Urin. Somit wird hochwirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.



Ablasshahn im Doghouse

Eine spezielle Konterwulst am Kolben des Ablasshahns garantiert eine einfache und sichere Handhabung. Leckagen, verursacht durch ein zu weites Verschieben des Kolbens, sind damit ausgeschlossen.

Verpackungseinheit: 10 Stck

Verpackung: steril

Abbildungen knnen vom Original abweichen