

Cenaman ENFit™ Spritzen

Die ENFit™-Spritzen dienen der Verabreichung enteraler Ernährung und/oder der Applikation von Medikamenten. Die Spritzen sind mit allen ENFit™-Sonden kompatibel. Durch die Möglichkeit der Wiederverwendung wird Abfall reduziert - ein wichtiger Beitrag zu einer nachhaltigeren Gesundheitsversorgung.

Die Cenaman ENFit™-Spritzen verringern das Risiko einer unbeabsichtigten Fehlkonnektion. Alle Spritzen sind mit dem sicheren enteralen Konnektor ENFit™ gemäß internationalem Sicherheitsstandard ISO 80369-3 ausgestattet und bieten somit höchste Sicherheit in der Anwendung.

Merkmale:

- Klare Messmarkierungen
- Latex-/DEHP-frei
- Hochwertiger Silikonring für verbesserte Haltbarkeit und fortschrittliche Innenbeschichtung zur Minimierung der Reibung und Gewährleistung eines reibungslosen Gebrauchs
- Konzipiert für eine bis zu 7-tägige Anwendung am selben Patienten („single patient use“), wodurch Abfall reduziert und die Kosteneffizienz verbessert wird



Anwendungshinweise:

- Vorgesehen für die Verabreichung flüssiger Medikamente, enteraler Ernährung und die Flüssigkeitszufuhr
- Wiederverwendbare Spritzen, die für die mehrfache Verwendung am selben Patienten für bis zu 7 Tage ausgelegt sind
- Sorgen Sie für eine ordnungsgemäße Reinigung und Lagerung zwischen den Anwendungen, um Sicherheit und Leistung aufrechtzuerhalten:
 1. Waschen Sie den Spritzenkörper und den Kolben in handwarmem Seifenwasser
 2. Spülen Sie beides mit klarem Leitungswasser ab und lassen Sie es an der Luft trocknen
 3. Bewahren Sie die Spritze in einem sauberen, trockenen Behälter mit Deckel auf
- Vermeiden Sie zu viel Druck oder eine zu schnelle Flüssigkeitsverabreichung

Bestellinformationen

Artikel	Art.-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	VE	Umkarton
Cenaman ENFit Spritze SPU 20 ml	409370-30	19401919	03.29.01.1161	30 X 1	180 (6 X 30)
Cenaman ENFit Spritze SPU 60 ml	409380-30	19401925	03.29.01.1162	30 X 1	90 (3 X 30)



Mediq Deutschland GmbH
In der Bruchwies 10
66663 Merzig

Telefon 0800 519 61 00
Fax 0800 519 61 01
business@mediq.de
www.mediq.de

Hersteller:
Medeco B.V.
Brandpuntlaan
Zuid 14 | 2665 NZ Bleiswijk
The Netherlands

