



Saurer Enthärter für die thermische Aufbereitung von Steckbecken und Urinflaschen

thermosept® SKS

Unser Plus

- verhindert den Aufbau von Kalkbelägen
- unterstützt eine rückstandsfreie Abtrocknung des Spülgutes
- schaumfrei, enthält keine Tenside
- besonders umweltschonend
- hohe Materialverträglichkeit bei Edelstahl und diversen Kunststoffen

Anwendungsgebiete

thermosept® SKS ist geeignet für die Verwendung zur thermischen Aufbereitung von Steckbecken und Urinflaschen. thermosept® SKS verfügt über spezielle Enthärterkomponenten zur Abbindung der Wasserhärte und sorgt für eine fleckenfreie Abtrocknung des Spülgutes. Das Produkt ist schaumfrei und bei allen Wasserhärten verwendbar.

Anwendungshinweise

Dosierung:

0,01 % pro 1° dH, das entspricht einer Dosierung von 0,1 - 0,3 %, (1 - 3 ml/l Wasser).

Die Dosierung erfolgt über maschineneigene Dosierpumpen, diese sind auf Säurebeständigkeit zu prüfen. Sollte eine starke Verkalkung des Heizstabes festgestellt worden sein, empfiehlt es sich, vor Einsatz von thermosept® SKS eine Entkalkung vorzunehmen (z.B. mit thermosept® NKZ oder thermosept® NKP). thermosept® SKS verhindert auch bei hoher Wasserhärte Kalkablagerungen im Verdampfer.



Produktdaten

Zusammensetzung:

Härtestabilisator, Korrosionsinhibitoren, organische Säuren.

Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 1,08 g/cm ³ / 20 °C
Farbe	farblos
Flammpunkt	> 100 °C
Form	flüssig
pH	ca. 1,3 / 20 °C
Viskosität, dynamisch	Keine Daten verfügbar

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
thermosept SKS SOKA 5 kg KA	1/Kanister	145803
thermosept SKS 5 kg KA	1/Kanister	145806

Anwendungshilfen

Anwendungshilfen	Art.-Nr.
Kanisterschlüssel für 5 + 10 l	135810

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com. Für individuelle Fragen: Customer Sales Service Telefon: +49 40 52100-666 E-Mail: info@schuelke.com



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com