


Technisches Datenblatt

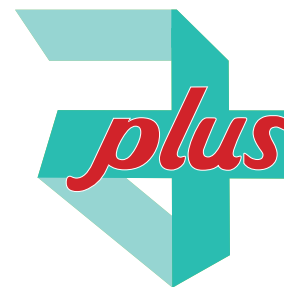

MaiMed® MyClean S

Feuchttuchspender / Spenderdose

Unbefülltes Spendersystem für trockene Vliestuchrolle / Nachfüllpack

Leichte Handhabung

- Optimal zu kombinieren mit den Produkten der MaiMed® MyClean-Serie
- Fassungsvermögen vom Feuchttuchspender: 3 Liter (70 Blatt) und 5 Liter (90 Blatt/140 Blatt)
- Spenderdose für die MaiMed® MyClean DS ViruComplete Desinfektionstücher 120 Blatt

Anwendung:

Den MaiMed® MyClean S - Feuchttuchspender mit einer Vliestuchrolle MaiMed® MyClean Wipes à 70 Stück (3-Liter Spender) bzw. 90 Stück oder 140 Stück (5-Liter Spender) befüllen und anschließend mit 1,5-2,5 Litern gebrauchsfertiger Desinfektionslösung tränken (Herstellerangaben auf Desinfektionstüchern beachten). Leere MaiMed® MyClean S - Spenderdose zur Befüllung mit MaiMed® MyClean DS ViruComplete Desinfektionstüchern. Deckel danach gut verschließen. Vor der Verwendung mindestens 30 Minuten durchziehen lassen.

Ausführungen:

MaiMed® MyClean S

Artikelbeschreibung	Größe	Art.-Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Spenderdose	-	79642	4046153116416	10420080	1 Stück
Feuchttuchspender	3 Liter	79643	4046153116430	10420068	1 Stück
Feuchttuchspender	5 Liter	79644	4046153116454	10420074	1 Stück

Hinweise:

Auf dem beiliegenden Etikett sind folgende Eintragungen zu machen: Produktname des Desinfektionsmittels, die Chargennummer, Konzentration, Einwirkzeit, Datum der Befüllung sowie Haltbarkeitsdatum der Befüllung (max. 28 Tage). Das Etikett ist gut sichtbar auf dem Eimerdeckel oder an geeigneter Stelle anzubringen. Vor der erneuten Befüllung ist der MaiMed® MyClean S Feuchttuchspender vollständig zu reinigen und zu desinfizieren. Der Spender ist beständig gegenüber herkömmlichen Desinfektionsmitteln und bis 65 °C spülmaschinenfest.

Spenderdose mit dem ablösbaren Etikett von MaiMed® MyClean DS ViruComplete Desinfektionstücher zur eindeutigen Kennzeichnung bekleben und zusätzlich mit dem Datum der Befüllung sowie die Haltbarkeitsdauer der Befüllung (max. 28 Tage) versehen. Vor der erneuten Befüllung ist die MaiMed® MyClean S Spenderdose zu reinigen und zu desinfizieren.

eClass:

30-30-06-91

Haltbarkeit nach Anbruch:

Fertig getränkte Tücher im MaiMed® MyClean S innerhalb von 28 Tagen verbrauchen, nur feuchte Tücher verwenden.

Symbole:



MaiMed® GmbH | Robert-Koch-Str. 1-7 | 29643 Neuenkirchen
Germany | Tel.: +49 5195 9707-0 | www.MaiMed.de

TD-MaiMed® MyClean-S-20230613-REV01