

Technisches Datenblatt



MaiMed® MyClean Wipes premium / soft Trockene Vliestuchrollen

Zur Anwendung in Kombination mit einem geeigneten Desinfektionsmittel und Spendersystem

Premium: Mit Lochung für optimales Tränkverhalten

Soft: Mit glatter Oberfläche

Anwendung: MaiMed® MyClean Wipes trockene Vliestuchrolle in wiederbefüllbares Spendersystem einlegen und mit 1,5-2,5 Liter der gebrauchsfertigen Desinfektionslösung tränken. Mindestens 30 Minuten im geschlossenen Spendersystem durchziehen lassen.

Hinweise: Auf dem beiliegenden Etikett sind folgende Eintragungen zu machen: Produktname des Desinfektionsmittels, die Chargennummer, Konzentration, Einwirkzeit, Datum der Befüllung sowie Haltbarkeitsdatum der Befüllung (max. 28 Tage). Das Etikett ist gut sichtbar auf dem Eimerdeckel oder an geeigneter Stelle anzubringen. Beachten Sie hierzu auch die Gebrauchsanweisung und die Gefahrenhinweise der verwendeten, fertigen Gebrauchslösung.

Ausführungen: **MaiMed® MyClean Wipes**

Artikelbeschreibung	Tuchgröße	Pack-Inhalt	Art.-Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
trockene Vliestuchrolle premium L	15 x 30 cm	140 Blatt	179627	4046153116515	10305982	8 Pack
trockene Vliestuchrolle premium XXL	29 x 30 cm	90 Blatt	179629	4046153116492	10305976	8 Pack
trockene Vliestuchrolle soft L	28 x 15 cm	140 Blatt	79655	4046153120956	11141196	8 Pack
trockene Vliestuchrolle soft XXL	28 x 30 cm	70 Blatt	79648	4046153118564	10843834	8 Pack
trockene Vliestuchrolle soft XXL	28 x 30 cm	90 Blatt	179646	4046153117031	10388086	8 Pack

eClass: **30-30-90-07**

Haltbarkeit nach Anbruch: Getränkte MaiMed® MyClean Wipes Vliestuchrolle innerhalb von 28 Tagen verbrauchen, nur feuchte Tücher verwenden.

Symbole:



MaiMed® GmbH
Robert-Koch-Str. 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany

TD-MaiMed® MyClean Wipes-2021-05