



NOBAMED Paul Danz AG

NOBAKAWA®

REF 101229

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Die transparente Kompresse (12 cm x 29 cm) wird, nachdem sie im Kühlschrank oder Gefrierfach gekühlt wurde, zur Kältetherapie eingesetzt. Die Kompresse ist auch bei -18°C noch flexibel und passt sich damit den Körperkonturen an. Anwendungsmöglichkeiten der Kältetherapie sind z.B. Prellungen, Verstauchungen und Entzündungen an Gelenken.

NOBAKAWA® kann auch im Wasserbad oder Mikrowelle (siehe Gebrauchsinformation) erwärmt und zur Wärmetherapie benutzt werden. Anwendungsmöglichkeiten der Wärmetherapie sind z.B. Muskelverspannungen und chronische Schmerzen des Bewegungsapparates ohne akute Entzündungen.

Die Kompresse ist mit einer Einweg-Schutzhülle aus weißem Vliesstoff bezogen und kann wiederholt eingesetzt werden. Vor dem Kühlen oder Erwärmen wird die Schutzhülle zweckmäßigerweise entfernt. Die Schutzhüllen sind separat erhältlich.

Kontraindikationen

Die Kompresse im Rahmen der Kältetherapie nicht bei Durchblutungsstörungen oder dem Raynaud-Syndrom anwenden.

Zusammensetzung

Wasser, Glycerin (20-45%), Carbomer, Konservierungsstoffe Chlormethylisothiazolinon und Methylisothiazolinon.

Normative und gesetzliche Anforderungen

NOBAKAWA® ist ein Medizinprodukt nach MPG, der Richtlinie 93/42/EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745 und wird in Klasse I, basierend auf Regel 1, eingestuft.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH. Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1- Kennzeichnung auf allen Verpackungsebenen.

Verpackung

Primärverpackung: transparenter Beutel

Sekundärverpackung: Karton
aus Cellulose

Hinweise

Die Kompresse vor dem Auflegen in die NOBAKAWA®-Schutzhülle oder in ein dünnes Tuch einschlagen, um Kälte- oder Wärmeverbrennungen zu vermeiden.

Nur zur äußeren Anwendung

Produkt nicht zum Verzehr geeignet.

Bei Beschädigungen die Kompresse nicht benutzen.

Bei Haut- oder Augenkontakt das Gel mit viel fließendem Wasser abspülen. Bei Verschlucken des Gels Mund gründlich mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken, ggf. Arzt hinzuziehen.

Das Produkt enthält folgendes Symbol und folgende Kennzeichnung

