



NOBAMED Paul Danz AG

NOBAHAFT®-crepp

REF 465006

Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Die kohäsive, elastische Fixierbinde, 6 cm x 4 m, besteht aus einem Gewebe mit gekräuselter Oberfläche und enthält kein Latex. Sie haftet nur auf sich selbst, aber nicht auf Haut oder Kleidung und wird zur Fixierung von Wundauflagen verwendet.

Zusammensetzung

Polyamid, Viskose, latexfreies Polymer

Kontraindikationen

Bei einer bestehenden Allergie gegen das Material sollte das Produkt nicht angewendet werden.

Hinweis

Beim Wickeln sollten kohäsive Binden nur leicht gedehnt werden, da es sonst zum Abbinden der arteriellen Blutzufuhr kommen kann.

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Normative und regulative

Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach
MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745.
Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Verpackung

Primärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose
Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter www.nobamed.com



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und DIN EN 1041.

Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei.

Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe.