



**NOBAMED Paul Danz AG**

## NOBAHAFT®-fein

**REF 474206**

### **Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung**

Die elastische Fixierbinde, gelb, 6 cm x 20 m, ist latexfrei, kohäsiv und haftet nur auf sich selbst und nicht auf Haut oder Kleidung. Sie hat eine feine und glatte Struktur und dient als Unterzug bei Tapeverbänden, überwiegend am Sprunggelenk. Mit ihr können jedoch auch Wundauflagen fixiert werden.

### **Zusammensetzung**

Viskose, Polyamid, latexfreies Polymer

### **Ereignisberichterstattung**

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

### **Kontraindikationen**

Bei einer bestehenden Allergie gegen das Material sollte das Produkt nicht angewendet werden.

### **Hinweis**

Beim Wickeln sollten kohäsive Binden nur leicht gedehnt werden, da es sonst zum Abbinden der arteriellen Blutzufuhr kommen kann.

### **Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen**

Medizinprodukt nach MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

### **Verpackung**

Primärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

### **Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:**

Erläuterungen unter [www.nobamed.com](http://www.nobamed.com)



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und DIN EN ISO 20417.

### **Lagerung und Transport**

Trocken und staubfrei.

### **Produkte zur Einmalverwendung**

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

### **Entsorgung**

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe.