



**NOBAMED Paul Danz AG**

## NOBADENT®

REF 149410

### Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Das Einmal-Produkt NOBADENT® ist eine weiße, weiche, chlorfrei gebleichte Zahnwatterolle, der **Größe 1 cm x 4 cm**. NOBADENT® wird bei der Zahnbehandlung im Dentalbereich eingesetzt und dient zur Aufnahme von Speichel, Sekret und Blut. Die Zahnwatterolle besitzt ein hohes Absorptionsvermögen und hat eine Polster- und Abhaltefunktion.

### Zusammensetzung

Baumwolle

### Hinweis

Die unsterile Watterolle muss vor ihrer Verwendung auf offenen Wunden mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden. Das Produkt kann mit Feuchter Hitze bei 121°C/134°C, 2 bis 3 bar, nach DIN EN 17665, Strahlen nach DIN EN ISO 11137 oder Ethylenoxid nach DIN EN ISO 11135 sterilisiert werden.

### Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden

### Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745.

Watte gemäß BP oder USP *absorbent cotton*

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

### Verpackung

Primärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

### Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter [www.nobamed.com](http://www.nobamed.com)



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und ISO 20417.

### Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei

### Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

### Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe