



NOBAMED Paul Danz AG

NOBARIP®

REF 475506

Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Die braune, kohäsive Binde (6 cm x 4,5 m) hat eine Dehnbarkeit von ca. 60 %. Die Kohäsivität verhindert das Verrutschen des fertigen Verbandes. Sie ist leicht abreißbar, was das schnelle, individuelle Anpassen der benötigten Länge möglich macht. Sie wird als Stütz- und Entlastungs- und Kompressionsverband sowie als Fixierungsverband eingesetzt. Die Anwendung erfolgt auf intakter Haut, offene Wunden werden vorher mit einer Wundauflage abgedeckt.

Zusammensetzung

Baumwolle, Elasthan, latexfreies Polymer

Hinweis:

Beim Wickeln sollten kohäsive Binden nicht zu stark gedehnt werden, da es sonst zum Abbinden der arteriellen Blutzufuhr kommen kann.

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Normative und regulative

Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Verpackung

Primärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter www.nobamed.com



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und DIN EN ISO 20417.

Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei.

Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe.