



NOBAMED Paul Danz AG

NOBATRICOT®

REF 320025

Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Der weiße elastische Trikotschlauch ist 2,5 cm breit und 20 m lang. Er wird aus partikelarmer, hydrophiler Polyesterfaser hergestellt und ist hypoallergen.

NOBATRICOT® wird zum Schutz der Haut als Unterzug bei starren und halbstarren Stützverbänden verwendet. Er kann auch als Unter- oder Überzug bei Zinkgelverbänden eingesetzt werden. Er eignet sich ebenfalls zur Fixierung von Wundauflagen.

Zusammensetzung

Polyester

Kontraindikationen

Bei einer bestehenden Allergie gegen das Material sollte das Produkt nicht angewendet werden.

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745.
Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Verpackung

Primärverpackung:	Faltschachtel aus Zellulose
-------------------	-----------------------------

Sekundär-Verpackung	Karton aus Zellulose
---------------------	----------------------

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter www.nobamed.com



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und ISO 20417.

Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei.

Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe.