



NOBAMED Paul Danz AG

NOBASTRETCH®-kräftig

REF 481710

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Die braune, dauerelastische Langzugbinde (Maße: 10 cm x 7 m) hat eine Dehnbarkeit von ca. 170 %. Aufgrund der Webart hat sie eine kräftige Struktur. Haupteinsatzgebiete von Langzugbinden sind Verbände zum Stützen und Entlasten bei Erkrankungen der Muskel- und Gelenke etc. wie z.B. bei Sportverletzungen. Zudem werden sie bei phlebologischen Indikationen wie oberflächliche Varizen und zur Nachbehandlung von Venenleiden eingesetzt. Mit Langzugbinden können zudem tagsüber Kompressionsverbände zur Entstauung von Ödemen ergänzt werden. Bei dieser Anwendung und generell bei der Anwendung als phlebologischer Kompressionsverband sind die einschlägigen medizinischen Leitlinien zu beachten. NOBASTRETCH®-kräftig wird aufgrund des hohen Ruhedrucks nicht über Nacht oder bei längeren Ruhepausen tagsüber angelegt.

Kontraindikationen

Nicht anwenden bei einer bekannten Allergie gegen die unten genannten Komponenten

Nicht bei tiefen Venenleiden anwenden

Bei einer medizinischen Kompressionstherapie sind die in den einschlägigen medizinischen Leitlinien genannten Kontraindikationen und Risiken zu beachten

Zusammensetzung

Baumwolle, Polyamid, Polyurethan

Normative und gesetzliche Anforderungen

NOBASTRETCH®-kräftig ist ein Medizinprodukt nach der Richtlinie MDD 93/42 EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745 und wird in die Klasse I, Regel 1, eingestuft.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH. Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Verpackung

Primärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei

Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnung:

