



NOBAZELLTUPF®

REF 208405

Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Die Zellstofftupferrolle ist mit Perforationen versehen, so dass sich die Tupfer praktisch abnehmen lassen. Der einzelne Tupfer hat die Maße 4,0 cm x 5,0 cm.

Die Tupfer eignen sich zur Vorbereitung von einfachen Punktionen mit geringem Risiko, z.B. Venenpunktionen zur Blutabnahme. Vor der oben genannten Tätigkeit muss das Produkt mit einem validierten Verfahren (Ethylenoxid, Strahlen, feuchte Hitze bei 121°C) sterilisiert werden.

Zusammensetzung

Cellulose

Hinweis

Vor Gebrauch sterilisieren

Kontraindikationen

Bei einer bestehenden Allergie gegen das Material sollte das Produkt nicht angewendet werden.

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden

Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach
MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745
Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Verpackung

Primär-
verpackung: PE-Beutel

Sekundär-
verpackung: Karton aus
Cellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter www.nobamed.com



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und DIN EN ISO 20417.

Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei.

Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe.