



NOBAMED Paul Danz AG

NOBASANA®

REF 510410

Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Die weiße Schaumstoffbinde (Breite 10 cm, 0,4 cm stark) hat eine hohe Elastizität und dient als Unterzugbinde für einen Kompressionsverband. Sie verteilt den Druck der darüber angelegten Kompressionsbinde gleichmäßig, so dass bei korrekter Anlage des Verbandes Einschnürungen vermieden werden. Die Binde verhindert auch das Verrutschen der darüber gewickelten Kompressionsbinde. Die Binde ist ungedehnt 2,5 m lang.

Zusammensetzung

Polyurethanschaum

Kontraindikationen

Bei einer bestehenden Allergie gegen das Material sollte das Produkt nicht angewendet werden.

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Verpackung

Primär: Faltschachtel aus Zellulose

Sekundär: Karton aus Zellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter www.nobamed.com



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und DIN EN ISO 20417.

Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei, vor Sonnenlicht schützen

Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe.