



NOBAMED Paul Danz AG

NOBAHEBAN[®]

REF 454407 (ab LOT 127266)

Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Die weiße kohäsive Kompressionsbinde (Maße 7,50 cm x 4,5 m) hat eine Dehnbarkeit von ca. 100 %. Sie wird für Verbände zur kurzfristigen Kompression verwendet. Dabei erfolgt die Anwendung über einem Tupfer oder Kompressen. Außerdem wird sie als Stütz- und Entlastungsverband eingesetzt.

Zusammensetzung

Polyamid, Polyester, latexfreies Polymer

Kontraindikationen

Bei einer bestehenden Allergie gegen das Material sollte das Produkt nicht angewendet werden.

Hinweis:

Beim Wickeln sollten kohäsive Binden nicht zu stark gedehnt werden, da es sonst zum Abbinden der arteriellen Blutzufuhr kommen kann.

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Normative und regulative

Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Verpackung

Primär:	Folie
Sekundär:	Faltschachtel aus Zellulose
Tertiär:	Karton aus Zellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter www.nobamed.com



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und DIN EN ISO 20417.

Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei

Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe.