



NOBAMED Paul Danz AG

NOBACOLLOID®

REF 790055 (ab LOT 137289)

Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

NOBACOLLOID® (5 cm x 5 cm) ist ein hydrokolloider Wundverband. Der Verband besteht aus einer saugfähigen Hydrokolloid-Matrix und einer atmungsaktiven Polyurethanfolie. Sobald NOBACOLLOID® mit dem Wundexsudat in Berührung kommt, bildet sich eine Schicht aus feuchtem Gel, die günstige Bedingungen für den Heilungsprozess schafft. NOBACOLLOID® ist für die lokale Behandlung von Beingeschwüren und Druckgeschwüren angezeigt.

Zusammensetzung

Hydrokolloid-Matrix, Haftklebstoff, Polyurethanfolie,

Kontraindikationen

Nicht bei infizierten Wunden anwenden. Verwenden Sie das Produkt nicht bei Patienten, die möglicherweise allergisch gegen einen der Inhaltsstoffe sind.

Vorsichtsmaßnahme

Die Verwendung von NOBACOLLOID® bei Beingeschwüren ersetzt nicht die Notwendigkeit einer Kompressionsbehandlung (Kompressionsstrümpfe oder Verbände), sofern diese vorgeschrieben ist.

Die Verwendung von NOBACOLLOID® bei Druckgeschwüren ersetzt nicht die Notwendigkeit einer regulären Krankenpflege.

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745

Die Sterilisation entspricht den Vorgaben der DIN EN 11137.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Verpackung


Primär: Folie-Papier Verpackung

Sekundär: Faltschachtel aus Zellulose

Tertiär: Karton aus Zellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter www.nobamed.com

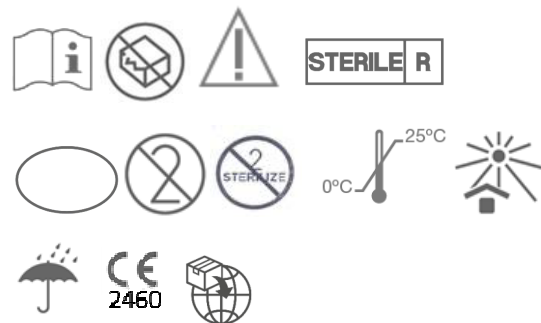

Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und DIN EN ISO 20417.

Lagerung und Transport

NOBACOLLOID® flach lagern.

Mit versiegelter Primärverpackung lagern. Trocken und vor Sonnenlicht geschützt lagern.

NOBACOLLOID® sollte unter trockenen Bedingungen bei 0~25°C gelagert werden.

Sterilprodukt

Vor Gebrauch des Sterilprodukts die Verpackung visuell auf Schäden prüfen, um sicherzustellen, dass die Verpackung intakt ist. Liegt eine beschädigte oder offene Primärverpackung vor, darf das Produkt nicht verwendet werden

Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einweg-Produkten kann zu einer mikrobiologischen Gefahr führen. Eine Aufbereitung zwecks Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen

Entsorgung

Gemäß geltenden gesetzlichen Regelungen und in Übereinstimmung mit den Vorgaben zur Infektionsverhütung.