



**NOBAMED Paul Danz AG**

## NOBACOLLOID®

REF 790110 (ab LOT 137289)

### Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

NOBACOLLOID® (10 cm x 10 cm) ist ein hydrokolloider Wundverband. Der Verband besteht aus einer saugfähigen Hydrokolloid-Matrix und einer atmungsaktiven Polyurethanfolie. Sobald NOBACOLLOID® mit dem Wundexsudat in Berührung kommt, bildet sich eine Schicht aus feuchtem Gel, die günstige Bedingungen für den Heilungsprozess schafft. NOBACOLLOID® ist für die lokale Behandlung von Beingeschwüren und Druckgeschwüren angezeigt.

### Zusammensetzung

Hydrokolloid-Matrix, Haftklebstoff, Polyurethanfolie,

### Kontraindikationen

Nicht bei infizierten Wunden anwenden. Verwenden Sie das Produkt nicht bei Patienten, die möglicherweise allergisch gegen einen der Inhaltsstoffe sind.

### Vorsichtsmaßnahme

Die Verwendung von NOBACOLLOID® bei Beingeschwüren ersetzt nicht die Notwendigkeit einer Kompressionsbehandlung (Kompressionsstrümpfe oder Verbände), sofern diese vorgeschrieben ist.

Die Verwendung von NOBACOLLOID® bei Druckgeschwüren ersetzt nicht die Notwendigkeit einer regulären Krankenpflege.

### Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

### Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745

Die Sterilisation entspricht den Vorgaben der DIN EN 11137.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

### Verpackung


Primär: Folie-Papier Verpackung

Sekundär: Faltschachtel aus Zellulose

Tertiär: Karton aus Zellulose

### Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter [www.nobamed.com](http://www.nobamed.com)

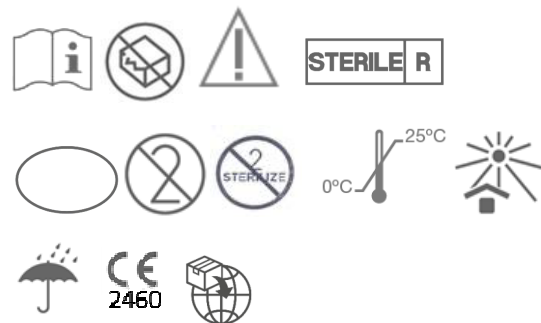

Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und DIN EN ISO 20417.

### Lagerung und Transport

NOBACOLLOID® flach lagern.

Mit versiegelter Primärverpackung lagern. Trocken und vor Sonnenlicht geschützt lagern.

NOBACOLLOID® sollte unter trockenen Bedingungen bei 0~25°C gelagert werden.

**Sterilprodukt**

Vor Gebrauch des Sterilprodukts die Verpackung visuell auf Schäden prüfen, um sicherzustellen, dass die Verpackung intakt ist. Liegt eine beschädigte oder offene Primärverpackung vor, darf das Produkt nicht verwendet werden

**Produkte zur Einmalverwendung**

Die Wiederverwendung von Einweg-Produkten kann zu einer mikrobiologischen Gefahr führen. Eine Aufbereitung zwecks Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen

**Entsorgung**

Gemäß geltenden gesetzlichen Regelungen und in Übereinstimmung mit den Vorgaben zur Infektionsverhütung.