



NOBAMED Paul Danz AG

NOBAFAST®

REF 330190

Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Der weiße, dichte, elastische Schlauchverband der **Größe 5 (beige markiert)** ist weich, anschmiegsam und hautfreundlich. Eine Farbmarkierung der einzelnen Breiten erleichtert dem Anwender die schnelle Breitenorientierung. NOBAFAST® dient als gut-sitzender Verband dem Hautschutz und wird als Unterzug bei starren und halbstarren Stützverbänden verwendet. Aufgrund des, in das Gewebe integrierten, Elastomers verfügt der Verband über eine hohe Elastizität, die zu einer faltenfreien Wundauflagenfixierung genutzt werden kann. Der aufgerollte Verband ist 10 m lang, für den einmaligen Gebrauch bestimmt und einzeln verpackt.

Zusammensetzung

Viskose, Elasthan, Polyamid, Polyester

Kontraindikation

Bei einer bestehenden Allergie gegen das Material sollte das Produkt nicht angewendet werden.

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden

Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Verpackung

Primärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter www.nobamed.com



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und ISO 20417.

Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei

Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe