



NOBAMED Paul Danz AG

NOBAFROTT®

REF 350058

Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Das Einmal-Produkt NOBAFROTT® ist ein ungebleichter, elastischer Frotteeschlauch mit einer **Größe** von **8 cm x 5 m**. Im rückwärtigen Bereich sind Kunststoffäden eingearbeitet, um eine optimale Elastizität zu erreichen. Aufgrund der Naturfasern ist er für Patienten geeignet, die zu Allergien neigen. NOBAFROTT® dient als Unterzug zum Hautschutz und zur Polsterung bei Gips- und Kunststoffverbänden. Hierfür ist er individuell zuzuschneiden, leicht anzubringen, weich, wasserdampf- und luftdurchlässig, passt sich den Körperformen an und bietet dadurch einen hohen Tragekomfort. Der Gips- oder Kunststoffverband kann ohne zusätzliches Polstermaterial direkt über dem Frotteeschlauch angelegt werden.

Zusammensetzung

Baumwolle, Elasthan, Polyamid

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden

Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Verpackung

Primärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter www.nobamed.com



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und DIN EN 1041.

Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei, vor Sonneneinstrahlung schützen

Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe