



NOBAMED Paul Danz AG

NOBATAMP®-steril

REF 631402 (ab LOT 134162)

Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Sterile, einzeln verpackte Tamponadebinde der **Größe 2 cm x 40 cm** aus Baumwolle. NOBATAMP®-steril dient zur Tamponade oder Drainage von Wundhöhlen und Fistelgängen. Zur Verwendung in natürlichen Körperöffnungen (z.B. Nasenraum) sind sie ebenfalls geeignet. Sie sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt. NOBATAMP®-steril sind saugfähig, reißfest und luftdurchlässig.

Zusammensetzung

Baumwolle

Kontraindikationen

Bei einer bestehenden Allergie gegen das Material sollte das Produkt nicht angewendet werden.

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745. Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Das Produkt entspricht den normativen Vorgaben der DIN EN 14079.

Die Sterilisation erfolgt entsprechend der DIN EN ISO 11135.

Verpackung

Primärverpackung:	Papier-Folie-Verpackung
Sekundärverpackung:	Faltschachtel aus Zellulose
Tertiärverpackung:	Karton aus Zellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter www.nobamed.com



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und DIN EN ISO 20417.

Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei.

Sterilprodukt

Führen Sie vor der Verwendung eines Sterilproduktes eine Sichtprüfung der Verpackung auf Unversehrtheit durch.

Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe.